

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2 / 年 6 月 22 日

販売名 サビ・スマニアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒ オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 3.1 Ver. 3.1 Ver. 1.0	製造番号 : 300154 作業年月日 : 2 / 年 6 月 22 日 納入年月日 : 13 年 12 月 27 日
顧客名 所在地	佐竹医院 御中 兵庫県加西市北条町北条16		ご担当 : 院長先生 様 電話番号 : 0790-42-4057
作業区分 出張・引取	有償 ☒ 無償 ☐ 保証期間 ☐ 保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 4 回目 修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐		作業時間 / Hr 定期点検シール記入 ☒ 修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

E2/2 x ①

E2/10 x ①

不具合原因、作業内容

保守部品交換

点検項目

フタロック	正常	☒	エアライン	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 6 85
アルコールライン	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	排気ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.69 ppm
水位センサー	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	電源コード	正常	☒
清掃	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
トレイ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	前回交換日/交換回数	21.6.22 / 19779回	
殺菌槽 LED	正常	☒	運転ランプバージョン	正常	☒ Ver. 0207 To 4C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

完了

装置 情報	交換後運転回数: 19779 回	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒: 3146 回	消毒+アル: 2776 回
	リークチェック: 2449 回	自己洗浄: 1306 回	アルコール単独: 67 回	エア単独: 29 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計 ☒ 1個 交換後 No. 52001007	
オゾンセンサー ☒ 1個 交換後 No. 170110-001	
給水フィルター ☐ 1本 (中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒 ☒ 1個	
接続コネクタ; 水槽側 ☒ 1個	
接続コネクタ; チューブ側 ☒ 1個	
オゾン水濃度計用フィルタ ☒ 1個	
排水フィルター ☐ 1個 (従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓 ☒ 1個	
エアフィルター ☐ 1個	
水フィルター ☐ 1個	
吸盤 ☒ 1個	
マニホールド周辺チューブ ☒ 1セット	
マニホールドチューブ (青) ☒ 1コ	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

3 年 6 月 22 日

ご署名

1727

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

山田