

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2021年 7月 16日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号 : 300606
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日 : 2021年 7月 16日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日 : 2015年 8月 5日
顧客名	まつむらクリニック 御中		ご担当 : 院長先生 様
所在地	大阪府大阪市鶴見区横堤1-12-17		電話番号 : 06-6914-1199
作業区分	有償 ☒ 無償 ☐ 保証期間 ☐ 作業時間 1.0 Hr		
	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 6回目 定期点検シート記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、~~異常履歴~~

ナシ

不具合原因、作業内容

電源コード被覆が剥がれ有り、次回点検時に念の為交換推奨。

点検項目

フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 残圧 7.0mpa	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 542
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.66 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒ プラグ差し込部被覆剥
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	2019/7/25 / 531回
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0207 / T02C

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

保守メンテナンス完了、正常運転確認。

装置 情報	交換後運転回数 : 85 回	更新 (リセット) ☒ 実施・未実施	消毒 : 8 回	消毒+アル : 687 回
	リークチェック : 45 回	自己洗浄 : 2 回	アルコール単独 : 0 回	エア単独 : 0 回

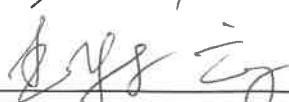
交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計 ☒ 1個		オゾン分解触媒 ☒ 1個		排水栓 ☒ 1個	
交換後 No. 15102178		接続コネクタ: 水槽側 ☒ 1個		エアフィルター ☐ 1個	
オゾンセンサー ☒ 1個		接続コネクタ: チューブ側 ☒ 1個		水フィルター ☐ 1個	
交換後 No. 210127-010		オゾン水濃度計用フィルタ ☒ 1個		吸盤 ☒ 1個	
給水フィルター ☐ 1本		排水フィルター ☐ 1個		マニホールド周辺チューブ ☒ 1セット	
(中空糸・活性炭・糸巻)		(従来型・新型)		☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

3 年 7 月 16 日

修理業者

新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL : 06-6228-3311

責任技術者

作業者

和田