

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020年9月10日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号	: 300377	
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日	: 2020年9月10日	
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日	: 2014年9月22日	
顧客名	阿部内科 阿部内科		御中	ご担当	: 院長先生 様
所在地	兵庫県三田市弥生が丘1丁目11			電話番号	: 079-562-8428
作業区分	有償 ☐	無償 ☒	保証期間 ☐	作業時間	1.5 Hr
	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入	☐
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
酸素濃度異常が頻発	
不具合原因、作業内容	
対策として給水フィルタ装着後、気泡を抜く為、1-1チェック実施。するとポンプ(給水)側より空気鉄砲の様な音とともに酸素濃度異常が頻発(10分程度)の大きさ)取り除いた後、給水フィルタを外し通常運転を実施。問題なく消滅した。	
点検項目	
フタロック	正常 ☐
酸素ライン	正常 ☐
アルコールライン	正常 ☐
オゾンセンサ	正常 ☐
給水ライン	正常 ☐
濃度計流量	正常 ☐
水位センサー	正常 ☐
水漏れ確認	正常 ☐
清掃	正常 ☐
トレー	正常 ☐
殺菌槽コネクタ	正常 ☐
殺菌槽 LED	正常 ☐
エアライン	正常 ☐
オゾン水濃度計動作	正常 ☐ バルブ数
排水栓、排水ライン	正常 ☐
細管送水ライン	正常 ☐
排気ライン	正常 ☐
オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
異常音、振動	正常 ☐
電源コード	正常 ☐
殺菌チューブ類	正常 ☐
マニホールド周辺チューブ	正常 ☐
前回交換日/交換回数	/
運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. /
作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	
完了(今回は異物が原因と見られます)	

装置情報	交換後運転回数: 79 回	更新(リセット)実施・未実施	消毒: 188 回	消毒+アル: 528 回
	リークチェック: 3 回	自己洗浄: 3 回	アルコール単独: 1 回	エア単独: 14 回

交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☐ 1個	オゾン分解触媒	☐ 1個	排水栓	☐ 1個
交換後 No.		接続コネクタ; 水槽側	☐ 1個	エアフィルター	☐ 1個
オゾンセンサー	☐ 1個	接続コネクタ; チューブ側	☐ 1個	水フィルター	☐ 1個
交換後 No.		オゾン水濃度計用フィルタ	☐ 1個	吸盤	☐ 1個
給水フィルター	☐ 1本	排水フィルター	☐ 1個	マニホールド周辺チューブ	☐ 1セット
(中空糸・活性炭・糸巻)		(従来型・新型)			

お客様ご確認署名欄	2020年 9月10日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 阿部 和夫	印

修理業者	新鋭工業 株式会社 大阪支店 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1 TEL: 06-6228-3311	責任技術者	作業業者
			山田