

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：

2021年 8月 4日

販売名 ／ サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号	: 301218	
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日	: 2021年 8月 4日	
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日	: 2017年 8月 22日	
顧客名	なかいクリニック 御中			ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府貝塚市鳥羽159-1			電話番号	: 072-430-5008
作業区分	有償 ☒	無償 ☐	保証期間 ☐	作業時間	1.5 Hr
	保守点検 ☒	総合点検 ☐	4回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目					
フタロック	正常	☒	エアライン	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルス数 486
アルコールライン	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	排気ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.67 ppm
水位センサー	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	電源コード	正常	☒
清掃	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
トレー	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	前回交換日／交換回数	2020/8/4 / 2819回	
殺菌槽 LED	正常	☒	運転プログラムバージョン	正常	☒ Ver. 0207 / To3C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

待機時主電源ONユーザー
スリッパ履替要。

装置 情報	交換後運転回数：	889 回	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	消毒：	293 回	消毒＋アル：	3415 回
	リークチェック：	0 回	自己洗浄：	1148 回	アルコール単独：	1 回	エア単独：

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計 ☒ 1個	
交換後 No. 18023089	
オゾンセンサー ☒ 1個	
交換後 No. 180731-003	
給水フィルター ☐ 1本	
（中空糸・活性炭・糸巻）	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒 ☒ 1個	
接続コネクタ；水槽側 ☒ 1個	
接続コネクタ；チューブ側 ☒ 1個	
オゾン水濃度計用フィルタ ☒ 1個	
排水フィルター ☐ 1個	
（従来型・新型）	

交換部品名称	交換・数量
排水栓 ☒ 1個	
エアフィルター ☐ 1個	
水フィルター ☐ 1個	
吸盤 ☒ 1個	
マニホールド周辺チューブ ☐ 1セット	
☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 清水 あやめ 印

R3 年 8 月 4 日

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL：06-6228-3311

責任技術者	作業者
	奥田