

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2021 年 6 月 29 日

販売名 / サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1	製造番号 500468
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐ Ver. 3.1	作業年月日 2021 年 6 月 29 日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☒ Ver. 1.0	作業時間 Hr
顧客名	村瀬医院 様	TEL:
所在地	兵庫県美方郡香美町村岡E村岡347	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☒	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

6/29 ランプ切れ異常 (E212) 発生

不具合原因、作業内容

オゾン水濃度計の受光センサーが故障しており、ランプの光を検知できていない。
これを交換しました。

点検項目

フタロック	正常 ☐	水槽 LED	正常 ☐
酸素ライン	正常 ☒ 残 25 MPa (差)	エアライン	正常 ☐
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 807
オゾンセンサー	正常 ☐	排水栓、排水ライン	正常 ☐
給水ライン	正常 ☐	細管送水ライン	正常 ☐
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☐
水位センサー	正常 ☐	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☐	異常音、振動	正常 ☐
清掃	正常 ☐ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☐
トレイ	正常 ☐	殺菌/消毒 チューブ類	正常 ☐
水槽側コネクタ	正常 ☐	マニホールド周辺チューブ	正常 ☐
		運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0304 / T12A

作業結果 (完了)、暫定処理など、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 28	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施	殺菌/消毒: 91 / 87	殺菌/消毒+アル: 164 / 164
	リークチェック: 250	自己洗浄: 143	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☐	吸盤	☐
交換後 No. 16032247			排水栓	☐	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☐		接続コネクタ; 水槽側	☐	水フィルター	☐
	☐		接続コネクタ; チューブ側	☐		☐
			オゾン水濃度計用フィルタ	☐		☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 6 月 29 日

ご署名

村瀬
印

修理業者 株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シバウラ)
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者	作業者
中澤	中澤