

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2021年 9月 13日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号 : 300117
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日 : 2021年 9月 14日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日 : 2013年 10月 11日
顧客名	たかだ内科医院 御中		ご担当 : 院長先生 様
所在地	滋賀県近江八幡市日吉野町675		電話番号 : 0748-33-1203
作業区分	有償 ☒ 無償 ☐	保証期間 ☐	作業時間 1.5 Hr
	保守点検 ☒ 総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☐	エアライン	正常 ☐
酸素ライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ バルブ数 520
アルコールライン	正常 ☐	排水栓、排水ライン	正常 ☐
オゾンセンサ	正常 ☐	細管送水ライン	正常 ☐
給水ライン	正常 ☐	排気ライン	正常 ☐
濃度計流量	正常 ☐	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 0.69 ppm
水位センサー	正常 ☐	異常音、振動	正常 ☐
水漏れ確認	正常 ☐	電源コード	正常 ☐
清掃	正常 ☐	殺菌チューブ類	正常 ☐
トレイ	正常 ☐	マニホールド周辺チューブ	正常 ☐
殺菌槽コネクタ	正常 ☐	前回交換日/交換回数	2017/10/30 / 4768回
殺菌槽 LED	正常 ☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0204 / T03C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 903 回	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施	消毒: 1836 回	消毒+アル: 6392 回
	リークチェック: 931 回	自己洗浄: 829 回	アルコール単独: 26 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒ 1個
交換後 No. 1311 1691	
オゾンセンサー	☒ 1個
交換後 No. 12073 / 1017	
給水フィルター	☒ 1本
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☒ 1個
接続コネクタ: 水槽側	☒ 1個
接続コネクタ: チューブ側	☒ 1個
オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1個
排水フィルター	☒ 1個
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓	☒ 1個
エアフィルター	☐ 1個
水フィルター	☐ 1個
吸盤	☒ 1個
マニホールド周辺チューブ	☐ 1セット
	☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

R3 年 9 月 14 日

ご署名 たかだ内科医院 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中川