

## 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2021年 9月 13日

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 販売名<br>サービスマニュアル<br>Ver (版番号) | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> Ver. 3.1<br>オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/> Ver. 3.1<br>オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus <input type="checkbox"/> Ver. 1.0                                                                                    | 製造番号 : 300662<br>作業年月日 : 2021年 9月 13日<br>納入年月日 : 2015年 10月 20日                                  |
| 顧客名                           | とくいクリニック 御中                                                                                                                                                                                                                                                                    | ご担当 : 院長先生 様                                                                                    |
| 所在地                           | 大阪府茨木市大池2丁目13-22                                                                                                                                                                                                                                                               | 電話番号 : 072-636-1091                                                                             |
| 作業区分                          | 有償 <input checked="" type="checkbox"/> 無償 <input type="checkbox"/> 保証期間 <input type="checkbox"/><br>保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 4回目<br>出張・引取 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> | 作業時間 1.5 Hr<br>定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/><br>修理表示貼付 <input type="checkbox"/> |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

## 点検項目

|          |    |                                     |              |                  |                                                      |
|----------|----|-------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン        | 正常               | <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 酸素ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作    | 正常               | <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 425         |
| アルコールライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン    | 正常               | <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| オゾンセンサ   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン      | 正常               | <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 給水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン        | 正常               | <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 濃度計流量    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度        | 正常               | <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.65 ppm      |
| 水位センサー   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動       | 正常               | <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 水漏れ確認    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常               | <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 清掃       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類      | 正常               | <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| トレイ      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | マニホールド周辺チューブ | 正常               | <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 前回交換日/交換回数   | 2019/9/5 / 3017回 |                                                      |
| 殺菌槽 LED  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 運転プログラムバージョン | 正常               | <input checked="" type="checkbox"/> Ver. 0207 / T02C |

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

|          |                 |                                                       |              |               |
|----------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 1979 回 | 更新 (リセット) 実施 <input checked="" type="checkbox"/> ・未実施 | 消毒: 1242 回   | 消毒+アル: 3754 回 |
|          | リークチェック: 3756 回 | 自己洗浄: 1518 回                                          | アルコール単独: 7 回 | エア単独: 2 回     |

| 交換部品名称                                                               | 交換・数量 |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| オゾン水濃度計 <input checked="" type="checkbox"/> 1個<br>交換後 No. 18073212   |       |
| オゾンセンサー <input checked="" type="checkbox"/> 1個<br>交換後 No. 180523-004 |       |
| 給水フィルター <input type="checkbox"/> 1本<br>(中空糸・活性炭・糸巻)                  |       |

| 交換部品名称                                               | 交換・数量 |
|------------------------------------------------------|-------|
| オゾン分解触媒 <input checked="" type="checkbox"/> 1個       |       |
| 接続コネクタ: 水槽側 <input checked="" type="checkbox"/> 1個   |       |
| 接続コネクタ: チューブ側 <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |       |
| オゾン水濃度計用フィルタ <input checked="" type="checkbox"/> 1個  |       |
| 排水フィルター <input type="checkbox"/> 1個<br>(従来型・新型)      |       |

| 交換部品名称                                                | 交換・数量 |
|-------------------------------------------------------|-------|
| 排水栓 <input checked="" type="checkbox"/> 1個            |       |
| エアフィルター <input type="checkbox"/> 1個                   |       |
| 水フィルター <input type="checkbox"/> 1個                    |       |
| 吸盤 <input checked="" type="checkbox"/> 1個             |       |
| マニホールド周辺チューブ <input checked="" type="checkbox"/> 1セット |       |
| <input type="checkbox"/>                              |       |

## お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021年 9月 13日

ご署名

得庄 将文

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 大阪支店  
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1  
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

寶