

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 :

2021年 9月 21日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号 : 300654
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日 : 2021年 9月 21日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日 : 2015年 9月 24日
顧客名	阪口内科皮膚科クリニック 御中		ご担当 : 院長先生 様
所在地	大阪府阪南市箱作3505-2		電話番号 : 072-481-3939
作業区分	有償 ☒	無償 ☐	保証期間 ☐
	保守点検 ☒	総合点検 ☐	6回目
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐
			作業時間 / Hr
		定期点検シール記入 ☒	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 408
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒ 7979-取付済
トレー	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	2020年9月14日 / 479回
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0207 / T62C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置	交換後運転回数 : 79 回	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒 : 39 回	消毒+アル : 519 回
情報	リークチェック : 0 回	自己洗浄 : 8 回	アルコール単独 : 0 回	エア単独 : 0 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒ 1個
交換後 No. 11070704	
オゾンセンサー	☒ 1個
交換後 No. 120821-006	
給水フィルター	☐ 1本
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☒ 1個
接続コネクタ：水槽側	☒ 1個
接続コネクタ：チューブ側	☒ 1個
オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1個
排水フィルター	☐ 1個
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓	☒ 1個
エアフィルター	☐ 1個
水フィルター	☐ 1個
吸盤	☒ 1個
マニホールド周辺チューブ	☐ 1セット
	☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

R 3 年 9 月 21 日

ご署名 阪口 英伸

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中心区今橋1-6-1
TEL : 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	奥田