

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2021年 9月 17日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 0ED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号 : 300491
	オゾン水内視鏡消毒機 0ED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日 : 2021年 9月 17日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 0ED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日 : 2015年 3月 12日
顧客名	JOHメディカルクリニック 様		ご担当 : 院長先生 様
所在地	大阪府大阪市北区曽根崎新町1-4-20桜橋IMビル2階		電話番号 : 06-6147-8136
作業区分	有償 ☒ 無償 ☐ 保証期間 ☐ 作業時間 1.0 Hr		
	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 4回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目			
フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 384
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.67 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☐
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	2018/10/9 / 207回
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0207 / T.4c

作業結果 (完了) 暫定処理など、連絡事項、特記事項
保守メンテナンス完了, 正常運転確認

装置 情報	交換後運転回数: 334 回	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒: 74 回	消毒+アル: 1122 回
	リークチェック: 1174 回	自己洗浄: 2 回	アルコール単独: 1 回	エア単独: 1 回

交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒ 1個	オゾン分解触媒	☒ 1個	排水栓	☒ 1個
交換後 No. 14031722		接続コネクタ; 水槽側	☒ 1個	エアフィルター	☐ 1個
オゾンセンサー	☒ 1個	接続コネクタ; チューブ側	☒ 1個	水フィルター	☐ 1個
交換後 No. 140617-006		オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1個	吸盤	☒ 1個
給水フィルター	☐ 1本	排水フィルター	☐ 1個	マニホールド 周辺チューブ	☐ 1セット
(中空糸・活性炭・糸巻)		(従来型・新型)			☐

お客様ご確認署名欄	令和3年 9月 17日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	ご署名 青木 悦子
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	

修理業者	新鋭工業 株式会社 大阪支店 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1 TEL: 06-6228-3311	責任技術者	作業者
			和田