

新鋭工業：山田氏

IAT：三好

【OED概要】

2019年12月16日納品。IAT→新鋭→やよい(株)（オリンパス代理店）→ユーザー

白色化・残水・副送水残水・洗浄水飛び散りの問題発生中。

【内視鏡概要】

GIF-1200N×1本→2020年11月納品

GIF-H290×1本→元々使用。

CF-H290×1本→元々使用。

【その他】毎回消毒+アルコールモード、洗浄1分で行っている。キシロカインスプレー使用。
用手洗剤、エンドフレッシュ（中性酵素）

【検査件数】

内視鏡納品後約200回

【白色化】→フォルダに写真あり。確認をお願いします。

対象内視鏡：GIF-1200N、GIF-H290

操作部のみ白い粉がついている。点のようなものが出ている。挿入部はきれい。



ここ最近つき始めたとのこと。GIF-1200Nの白い部分を三好がスポンジで洗ったところ取れた。

この白いモノが何なのか？？早急に教えてほしい。



【残水】→フォルダに写真あり。確認をお願いします。

対象内視鏡：GIF-1200N、GIF-H290、CF-H290

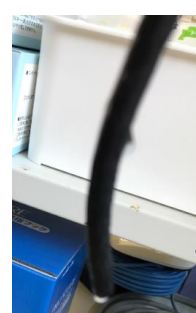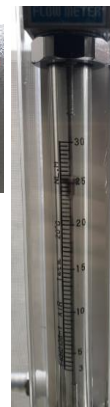

赤丸の部分から
水玉が出ていた。
5 c c ほど出てきた。

上

下

OEDで消毒後、濡れたままシステムにかけている。外表面の水滴が下に落ちているのでは??

普通の水道水が落ちても床は白くなる??

【副送水残水】

対象内視鏡：CF-H290


内視鏡画面が写らないと思ったら、糞便水が内視鏡から垂れていたとのこと。

副送水コネクターをチューブ直結へ修正した。

なぜか8×4チューブだったので、8×2チューブへ変更した。

様子見。

【洗剤水の飛び散り】

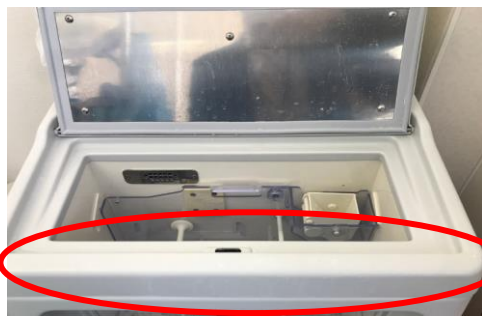

壁の飛び散った跡があり。
右前のキャスターに垂れた後あり。
アッパーカバーに飛び散った後あり。

【感想】

OED-1000S Plusの不具合が凝縮した案件である。

白いモノが何か??ほかにも事例あるか??と看護師と販売店に早急に回答必要あり。

成分分析が必要か??

以上

藤井内科クリニック、白色化・残水・副送水残水・洗浄水飛び散り対応



2021年3月3日

- ・内視鏡ボタン回収
 - ・壁の白色物回収
 - ・床の白色化物回収
- 残水は軽減したようだ。

藤井内科クリニック、白色化・残水・副送水残水・洗浄水飛び散り対応

2021年3月11日

3/3頃、内視鏡GIF-H290（経口）の代替品を入れる。
1週間足らずでGIF-H290の光源部が白色化。画像が写らなくなる。

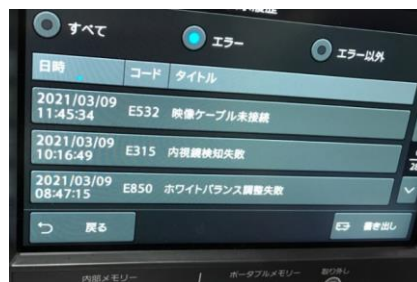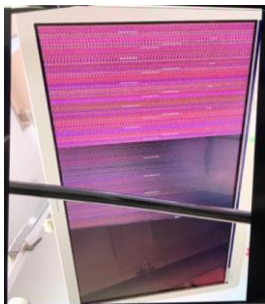


↑映らなくなった画面 ↑エラー一覧（写真以外にもあり）

3/10、GIF-H290の代品をさらに代品へ入れ替える。
GIF-1200Nを代品（GIF-XP290N）へ入れ替える。

3/11、訪問。pH紙でアルコールタンクにアイエスウォッシュが入っていないか確認。
水道水を採取。

内視鏡の表面の水滴をpH紙で採取。少し青い。

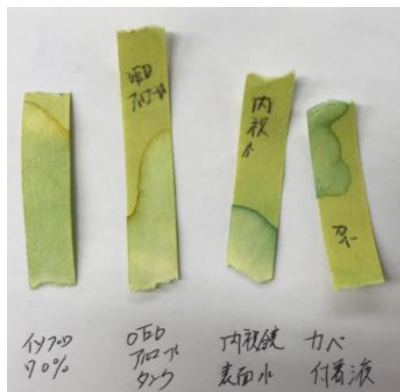

病院：森浦看護師

IAT: 元森M, 中澤S, 三好

【確認事項】

- ・洗い方に問題はない。
 - ・システム側にも白いのがついており、拭いても取れなかった。
 - ・内視鏡から垂れる水を採取するべく、ステンレス製のバットを森浦さんへ提供した。
 - ・森浦氏によると洗浄後の内視鏡の光源部がべたべたしていた。
- アイエスウォッシュの残留??

【今後】

- ・ステンレス製のバットを回収しに、3/19、12時に訪問。
- 水質調査継続。
- 付着物の調査継続。