

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 190128

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 大阪支店 殿		機種	OED-1000S Plus
客先	顧客名	やまうちクリニック 様		機番	500055
環営	所在地	京都府京都市伏見区小栗栖南後藤町 6-2		納入日	平成 26 年 04 月 04 日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成 30 年 12 月 12 日
計	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成 31 年 01 月 18 日

運転履歴

1/7 10:18 11:19 13:54 14:33 正常終了
 1/7 14:42 14:48 消毒時給水異常 (E:202)
 1/7 15:22 15:51 正常終了
 1/7 19:46 19:55 20:03 濃度維持異常 (E:302)
 1/7 20:32 正常終了
 1/8 10:15 10:45 正常終了
 1/9 18:41 正常終了

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

- ・濃度維持異常 (E:302) につきまして
 消毒工程中にオゾン水濃度が0.6ppmを維持できないと発生します。
 お預かりしている間、運転条件を振って確認しましたが異常は再現しませんでした。
 この異常に関係する部品（オゾン発生装置、オゾン水濃度計）を調べましたが
 問題ありませんでしたので 様子を見てくださいますようお願いいたします。
- ・機械に付着している白い粉につきまして
 アイエスウォッシュ原液を乾燥させた粉と「白さ」や「固さ」について
 比較しましたが、同一の物とは思われませんでした。
 粉が付着した状態で返却いたしますので、ご確認ください。

[2] 修理・点検内容

- 1：オゾン水濃度測定（規定値0.7±0.2ppm）：0.75 ppm・・正常
 2：出荷時の装置情報
 交換後運転回数：60 殺菌：22/17、殺菌+アルコール：40/40、リークチェック：1
 自己洗浄：0、アルコール単独：0、エア単独：1

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	エアフィルタ	1	性能向上品

承認	若井
審査	中澤
作成	H31.2.6 中澤

写真1：白い粉の状況



写真2：1/31 アイスクォッシュ原液を乾かした状態

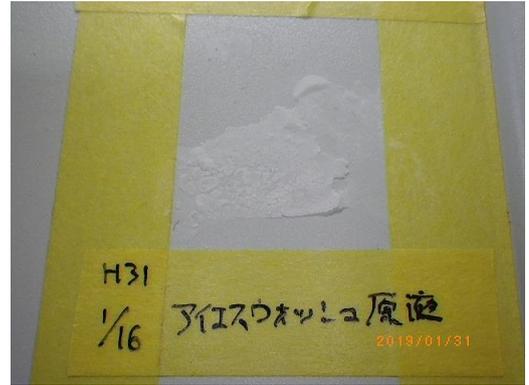


写真3：1/16 アイスクォッシュ原液滴下

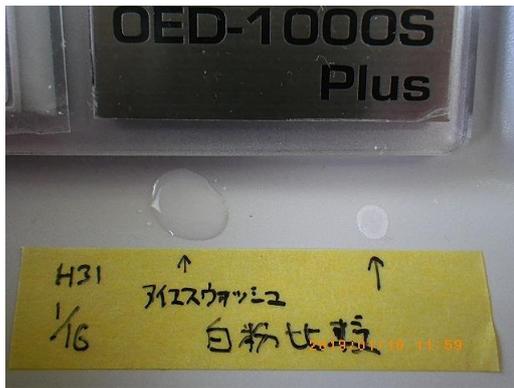


写真4：1/16 アイスクォッシュ原液 乾燥状態

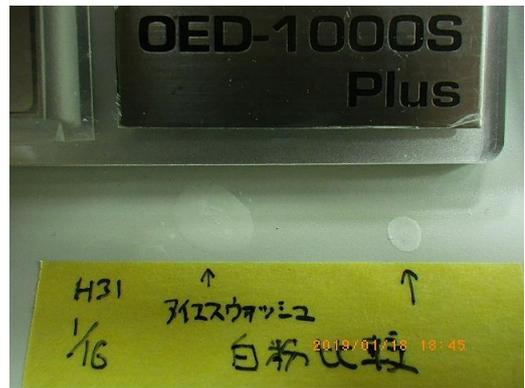


写真5：1/18 アイスクォッシュ原液を追加で滴下

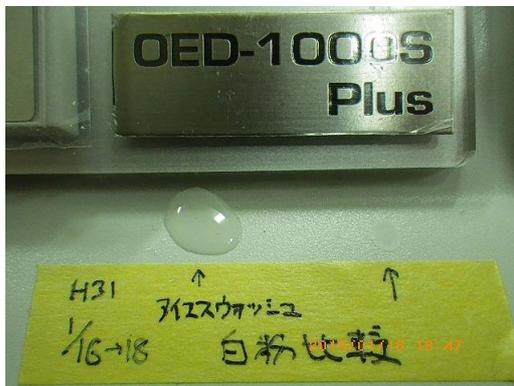


写真6：1/31 アイスクォッシュ原液 乾燥状態

