

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20190528

発行日 令和元年5月28日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号: 300243
作業年月日	令和元年 5月28日		作業時間: Hr
顧客名	あんどう内科 様		TEL: 078-611-7582
所在地	兵庫県神戸市長田区水笠通4-4-19		担当 様
販売店			担当 様
納入年月日	平成 26年 4月 30日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
濃度履歴表示不具合 (0ppm)	
不具合原因、作業内容	
運転中にタッチパネルが勝手に再起動する現象を確認しました この時に表示が 0ppm になりました。濃度は 0.6ppm まで上がり消毒は問題ありません	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒ 500g x 1 残 12MPa	エアライン 正常 ☐
アルコールライン 正常 ☐	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 569
オゾンセンサ 正常 ☐	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☐	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☐	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☐ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☐	正常 ☐
作業結果 (完了)、暫定処理など、連絡事項、特記事項	
社内調剤用にタッチパネルに基板を交換しました。 → 操作上に変更はありません	

装置 情報	交換後運転回数: 25	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施	殺菌: 616	殺菌+7L: 44
	リークチェック: 0	自己洗浄: 3	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
タッチパネル (カバー)		☒	1	コントロール基板		☒	1
087374H028621		☐		040431-0971		☐	
↓		☐		↓		☐	
124824C055181		☐		011181-0975		☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄		年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。		
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		
ご署名 安藤 健治 印		

修理業者 株式会社 IHI アグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者	作業者
中 澤 5.28	中澤