

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2021年 11月 9日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号	: 300152
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日	: 2021年 11月 9日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日	: 2013年 11月 13日
顧客名	白島内科 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府堺市西区鳳西町3丁目3-9		電話番号	: 072-265-5501
作業区分	有償 ☒	無償 ☐	保証期間 ☐	作業時間 1.5 Hr
	保守点検 ☒	総合点検 ☐	8回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

水位低下異常 E=300 (1/1 8:56, 1/5 9:11)
排水注意 E=111 (1/1 14:36, 1/2 9:06, 1/5 9:40,
1/6 13:44, 14:39, 15:41, 1/8 13:30, 14:18, 1/9)

不具合原因、作業内容

排水フィルターの目詰まりが原因と考えられます。
フィルター交換後、消毒運転・自己洗浄異常無し。

点検項目

フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 398
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.67 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレー	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	2019/11/13 / 3173回
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0207 / 162BV

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

シール貼付 吸盤交換 (排水ホース固定)

装置	交換後運転回数: 146 回	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒: 1531 回	消毒+アル: 2112 回
情報	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 328 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 1 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒ 1個
交換後 No. 14011654	
オゾンセンサー	☒ 1個
交換後 No. 141021-004	
給水フィルター	☐ 1本
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☒ 1個
接続コネクタ: 水槽側	☒ 1個
接続コネクタ: チューブ側	☒ 1個
オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1個
排水フィルター	☒ 1個
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓	☒ 1個
エアフィルター	☐ 1個
水フィルター	☐ 1個
吸盤	☒ 1個
マニホールド周辺チューブ	☐ 1セット
	☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 11 月 9 日

ご署名 山内 美奈 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者 作業者

奥田