

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

03-30711

No. 211112

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 大阪支店 殿			機種	OED-1000S
客先	顧客名	山縣クリニック 様			機番	300030
環営	所在地	兵庫県丹波市市島町上竹田 1099-1			納入日	2013年07月18日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間		受付日	2021年08月02日
	返送先	納入先と同じ			出荷日	2021年10月05日
計	3					

修理依頼・不具合内容


電源が入らない。各部清掃

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

分解点検したところ、直流電源のコンデンサが故障していました。
電源に異物や水がかかった形跡は無く、部品の単発故障と推察いたします。
この部品と基板を交換して復旧いたしました。

写真1：直流電源、コントロール基板、ドレンバルブ ASSY その1 写真2：ドレンバルブ ASSY その2

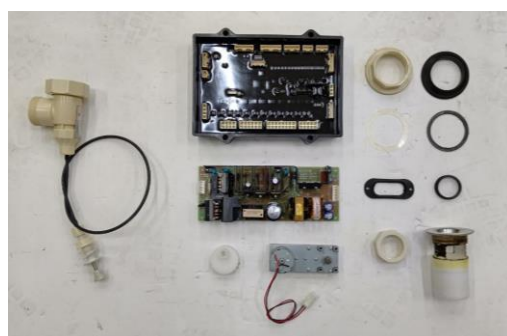

[2] 修理・点検内容

- 部品交換・写真と下表をご参照ください
- オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.68 ppm・正常
- 出荷時の装置情報
交換後運転回数：5 消毒：188、消毒＋アルコール：6005、リークチェック：5804
自己洗浄：2257、アルコール単独：1、エア単独：0

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
1	直流電源	1台	
2	ドレンバルブ ASSY		DCモータ、ハム含む
3	コントロール基板		Ver0209型 LED3V

（株）IHI物流産業システム

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 [TEL:086-944-6528](tel:086-944-6528)

Ver3.2

承認
責任技術者
作成
R03.11.12 中澤