

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2021年 12月 20日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号 : 300709
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日 : 2021年 12月 22日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日 : 2015年 12月 25日
顧客名	小山内科医院 御中		ご担当 : 院長先生 様
所在地	京都府宇治市大久保町北ノ山24-1ホムビル4階		電話番号 : 0774-46-3211
作業区分	有償 ☒ 無償 ☐ 保証期間 ☐	作業時間 1.5 Hr	
	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 6 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

マニホールドチューブ交換

点検項目					
フタロック	正常	☒	エアライン	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 440
アルコールライン	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	排気ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.72 ppm
水位センサー	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	電源コード	正常	☒
清掃	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
トレイ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒ 2021.12.22 3099
殺菌槽コネクタ	正常	☒	前回交換日/交換回数	2018/12/19 / 1646回	
殺菌槽 LED	正常	☒	運転プログラムバージョン	正常	☒ Ver. 0207/1020

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

背面パネル 右側 中段のネジ、回らなため外した。

装置 情報	交換後運転回数: 501 回	更新 (リセット) ☒ 実施・未実施	消毒: 3099 回	消毒+アル: 0 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 33 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒ 1個
交換後 No. 13051407	
オゾンセンサー	☒ 1個
交換後 No. 160217-001	
給水フィルター	☐ 1本
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☒ 1個
接続コネクタ: 水槽側	☐ 1個
接続コネクタ: チューブ側	☐ 1個
オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1個
排水フィルター	☐ 1個
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓	☒ 1個
エアフィルター	☐ 1個
水フィルター	☐ 1個
吸盤	☒ 1個
マニホールド周辺チューブ	☒ 1セット
	☐

お客様ご確認署名欄

年 月 日

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 松澤 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中川