

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2022年 1月 24日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 0ED-1000 ☐ Ver. 3.1 オゾン水内視鏡消毒機 0ED-1000S ☒ Ver. 3.1 オゾン水内視鏡洗浄消毒機 0ED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	製造番号 : 300471 作業年月日 : 2022年 1月 24日 納入年月日 : 2015年 1月 8日
顧客名	大垣クリニック 御中	ご担当 : 院長先生 様
所在地	京都市下京区烏丸通仏光寺上る二帖半敷町655座経京都烏丸ビル5階	電話番号 : 075-371-1655
作業区分	有償 ☒ 無償 ☐ 保証期間 ☐ 保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 7 回目 出張・引取	作業時間 / Hr 定期点検シール記入 ☒ 修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

定期交換

点検項目

フタロック	正常	☒	エアライン	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 508
アルコールライン	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	排気ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.72 ppm
水位センサー	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	電源コード	正常	☒
清掃	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
トレイ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	前回交換日/交換回数	2019/1/17 / 470回	
殺菌槽 LED	正常	☒	運転プログラムバージョン	正常	☒ Ver. 0205/702c

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

点検シール 完了。次回 Plus のログ持参

装置	交換後運転回数: 109 回	更新(リセット)実施・未実施	消毒: 11 回	消毒+アル: 815 回
情報	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 792 回	アルコール単独: 2 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒ 1個
交換後 No. 17112950	
オゾンセンサー	☒ 1個
交換後 No. 200107-019	
給水フィルター	☐ 1本
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☒ 1個
接続コネクタ; 水槽側	☐ 1個
接続コネクタ; チューブ側	☐ 1個
オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1個
排水フィルター	☐ 1個
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓	☒ 1個
エアフィルター	☐ 1個
水フィルター	☐ 1個
吸盤	☒ 1個
マニホールド周辺チューブ	☐ 1セット
	☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

林 愛

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

中川