

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2022年 1月 20日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒	Ver. 3.1	製造番号	: 100570
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	Ver. 3.1	作業年月日	: 2022年 1月 20日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日	: 2013年 2月 1日
顧客名	かよう内科・小児科 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府大阪市旭区清水4-3-29		電話番号	: 06-6954-7776
作業区分	有償 ☒ 無償 ☐ 保証期間 ☐	作業時間 1.0 Hr		
	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 9回目	定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

圧力調整器(酸素レギュレーター) Oリングパッキン交換。

点検項目

フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 残圧 13.0 mpa	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 407
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	2021/1/21 / 1161回
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0107 / T03D

作業結果(完了)、暫定処理など、連絡事項、特記事項

保守メンテナンス実施, 正常運転確認

装置 情報	交換後運転回数: 105 回	更新(リセット)実施・未実施	消毒: 79 回	消毒+7L: 1188 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 1012 回	7Lアルコール単独: 2 回	エア単独: 36 回

交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計 ☒ 1個		オゾン分解触媒 ☒ 1個		排水栓 ☒ 1個	
交換後 No. 14011657		接続コネクタ; 水槽側 ☐ 1個		エアフィルター ☐ 1個	
オゾンセンサー ☒ 1個		接続コネクタ; チューブ側 ☐ 1個		水フィルター ☐ 1個	
交換後 No. 180730-008M1		オゾン水濃度計用フィルタ ☒ 1個		吸盤 ☒ 1個	
給水フィルター ☐ 1本		排水フィルター ☐ 1個		マニホールド周辺チューブ ☐ 1セット	
(中空糸・活性炭・糸巻)		(従来型・新型)			

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

R4 年 1 月 20 日

ご署名

井 田 和 田

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

和田