

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2022年 1月 24日

販売名 サビ・スマニアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号	: 300766
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日	: 2022年 1月 24日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日	: 2016年 2月 18日
顧客名	たにぐちクリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府大阪市旭区森小路2丁目3-27サンハイツ1階		電話番号	: 06-6951-1717
作業区分	有償 ☒	無償 ☐	保証期間 ☐	作業時間 1.0 Hr
	保守点検 ☒	総合点検 ☐	6回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒		エアライン	正常 ☒	
酸素ライン	正常 ☒	残圧 13.0mpa	オゾン水濃度計動作	正常 ☒	バルブ数 519
アルコールライン	正常 ☒		排水栓、排水ライン	正常 ☒	
オゾンセンサ	正常 ☒		細管送水ライン	正常 ☒	
給水ライン	正常 ☒		排気ライン	正常 ☒	
濃度計流量	正常 ☒		オゾン濃度	正常 ☒	履歴 0.72 ppm
水位センサー	正常 ☒		異常音、振動	正常 ☒	
水漏れ確認	正常 ☒		電源コード	正常 ☒	
清掃	正常 ☒		殺菌チューブ類	正常 ☒	
トレイ	正常 ☒		マニホールド周辺チューブ	正常 ☒	
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		前回交換日/交換回数	2021/1/25 / 733回	
殺菌槽 LED	正常 ☒		運転プログラムバージョン	正常 ☒	Ver. 0207 / T03C

作業結果 (完了)、暫定処理など、連絡事項、特記事項

保守メンテナンス実施, 正常運転確認

装置 情報	交換後運転回数: 120 回	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒: 22 回	消毒+7L: 631 回
	リークチェック: 213 回	自己洗浄: 8 回	7L単独: 3 回	エア単独: 43 回

交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計 ☒ 1個		オゾン分解触媒 ☒ 1個		排水栓 ☒ 1個	
交換後 No. 52002049		接続コネクタ; 水槽側 ☐ 1個		エアフィルター ☐ 1個	
オゾンセンサー ☒ 1個		接続コネクタ; チューブ側 ☐ 1個		水フィルター ☐ 1個	
交換後 No. 141007-001		オゾン水濃度計用フィルタ ☒ 1個		吸盤 ☒ 1個	
給水フィルター ☐ 1本		排水フィルター ☐ 1個		マニホールド周辺チューブ ☐ 1セット	
(中空系・活性炭・糸巻)		(従来型・新型)		☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2022 年 1 月 24 日

ご署名

谷口 八重

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

和田