

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20220126

発行日: 2022 年 1 月 26 日

販売名 / サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.2	製造番号 500615
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐ Ver. 3.2	作業年月日 2022 年 1 月 26 日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☒ Ver. 1.1	作業時間 Hr
顧客名	姫路市国民健康保険家島診療所 様	TEL: 079-325-0485
所在地	兵庫県姫路市家島町宮2169	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	2021 年 1 月 13 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1 年 / 回目 定期点検シール記入 ☒	
☒ 出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

依頼内容	
2022年 定期保守点検	
不具合原因、作業内容	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	水槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒ 残圧 6.9 MPa	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ 濃度数 985
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.74 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒ 取手・フタ、小物入交換	殺菌/消毒 チューブ類 正常 ☒
水槽側コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
☐	運転プログラムバージョン 正常 ☒ Ver. 0304 / T12A
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	
異常ありませんでした。	

装置 情報	交換後運転回数: 22 → 0 更新 (リセット) ☒ 実施 ・ 未実施	殺菌/消毒: 1 / 0	殺菌/消毒+7L: 22 / 22
	リークチェック: 22	自己洗浄: 21	アルコール単独: 0
			エア単独: 4

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計 ☒		1	オゾン分解触媒 ☒		吸盤 ☒	
交換後 No. 18013030			排水栓 ☒		エアフィルター ☒	
オゾンセンサー ☒		1	接続コネクタ; 水槽側 ☒		水フィルター ☒	
121025-008			接続コネクタ; チューブ側 ☒			
☐			オゾン水濃度計用フィルタ ☒			

お客様ご確認署名欄	4 年 1 月 26 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 新井 和之	新井 印

修理業者 株式会社 IHI 物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者	作業者
中澤 澤	中澤