

釧路中央病院 御中

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者：宮内 啓太

点検年月日	22年 5月 25	機種名	ONW-10	製造機番	001823
設置場所	内視鏡室			TEL	
納入年月日	19年 5月 26	運転回数	873	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釘	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	交換 <input type="checkbox"/>		
フィルタリセット釘	正常 <input type="checkbox"/>	交換 <input type="checkbox"/>		
運転/停止釘	正常 <input type="checkbox"/>	交換 <input type="checkbox"/>		
アルコールモード釘	正常 <input type="checkbox"/>	交換 <input type="checkbox"/>		
ランプ類				
操作パネル	正常 <input type="checkbox"/>	交換 <input type="checkbox"/>		
蛍光灯	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	交換 <input type="checkbox"/>		
洗浄動作				
フタロック	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>		交換 <input type="checkbox"/>
給水	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>		交換 <input type="checkbox"/>
細管洗浄 順方向	正常 <input type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>		交換 <input type="checkbox"/>
細管洗浄 逆方向	正常 <input type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>		交換 <input type="checkbox"/>
細管洗浄 エアバージ	正常 <input type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>		交換 <input type="checkbox"/>
アルコールフラッシュ	正常 <input type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>		交換 <input type="checkbox"/>
オゾン分解ファン	正常 <input type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>		交換 <input type="checkbox"/>
排水	正常 <input type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>		交換 <input type="checkbox"/>
異常音、振動	正常 <input type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>		交換 <input type="checkbox"/>
性能確認				
オゾン水濃度	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	濃度：0.4 mg/L		
オゾンインジケータ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>			
酸素発生	正常 <input type="checkbox"/>	濃度：93.4% 流量：0.78 L/min 圧力：161~89 MPa		
水漏れ確認				
装置外	正常 <input type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>	交換 <input type="checkbox"/>	
装置内	正常 <input type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>	交換 <input type="checkbox"/>	
清掃				
外装	正常 <input type="checkbox"/>	清掃 <input checked="" type="checkbox"/>		
内部	正常 <input type="checkbox"/>	清掃 <input checked="" type="checkbox"/>		
洗浄コネクタ	正常 <input type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>	交換 <input type="checkbox"/>	
洗浄チューブ	正常 <input type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>	交換 <input type="checkbox"/>	

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 <input checked="" type="checkbox"/>	一式	
吸湿筒	交換 <input checked="" type="checkbox"/>	一式	
ドレン用フィルタ	交換 <input checked="" type="checkbox"/>	一個	
オゾン分解触媒	交換 <input checked="" type="checkbox"/>	一個	

22年 5月 25日

二番名 中村



中田内科医院 御中

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者：宮内 啓太

点検年月日	22年5月25	機種名	ONW-10	製造機番	001249
設置場所	内視鏡室			TEL	
納入年月日	年 月	運転回数	180	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	交換 <input type="checkbox"/>		
フィルタリセット釦	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	交換 <input type="checkbox"/>		
運転/停止釦	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	交換 <input type="checkbox"/>		
アルコールモード釦	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	交換 <input type="checkbox"/>		
ランプ類				
操作パネル	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	交換 <input type="checkbox"/>		
蛍光灯	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	交換 <input type="checkbox"/>		
洗浄動作				
フタロック	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>		交換 <input type="checkbox"/>
給水	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>		交換 <input type="checkbox"/>
細管洗浄 順方向	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>		交換 <input type="checkbox"/>
細管洗浄 逆方向	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>		交換 <input type="checkbox"/>
細管洗浄 エアバージ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>		交換 <input type="checkbox"/>
アルコールフラッシュ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>		交換 <input type="checkbox"/>
オゾン分解ファン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>		交換 <input type="checkbox"/>
排水	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>		交換 <input type="checkbox"/>
異常音、振動	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>		交換 <input type="checkbox"/>
性能確認				
オゾン水濃度	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	濃度: 0.4 mg/L		
オゾンインジケータ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>			
酸素発生	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	濃度: 9.5 % 流量: 0.82 L/min 圧力: 84~150 MPa		
水漏れ確認				
装置外	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>		交換 <input type="checkbox"/>
装置内	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>		交換 <input type="checkbox"/>
清掃				
外装	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	清掃 <input checked="" type="checkbox"/>		
内部	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	清掃 <input checked="" type="checkbox"/>		
洗浄コネクタ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	調整 <input checked="" type="checkbox"/>		交換 <input type="checkbox"/>
洗浄チューブ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	調整 <input type="checkbox"/>		交換 <input type="checkbox"/>

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 <input checked="" type="checkbox"/>	一式	
吸湿筒	交換 <input checked="" type="checkbox"/>	一式	
ドレン用フィルタ	交換 <input checked="" type="checkbox"/>	一個	
オゾン分解触媒	交換 <input checked="" type="checkbox"/>	一個	

年 月 日

二署名 蔵谷 (印)