

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

04-10603

No. 110629

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 札幌支店 殿	機種	ONW-10
客先	所在地	北海道恵庭市福住町1-6-6	機番	000590
環営	ユーザー名	恵庭第一病院 様	納入日	平成16年9月24日
防品	点検者	中澤一裕	作業時間	
	受付日		平成23年5月10日	
	返送先	納入先と同じ	出荷日	平成23年6月22日
計	3			


修理依頼・苦情内容

エアコンプレッサー圧力不足。オーバーホール依頼
平成23年4月15日 新鋭工業殿 定期点検実施

不具合原因（故障箇所）と処置予定

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

エアコンプレッサーのピストンカップが磨耗して吐出圧力が規程より低下していました。
（規程値：最大圧力0.140MPa 以上に対し測定値：0.128MPa）
このほか性能劣化した部品を交換いたしました。

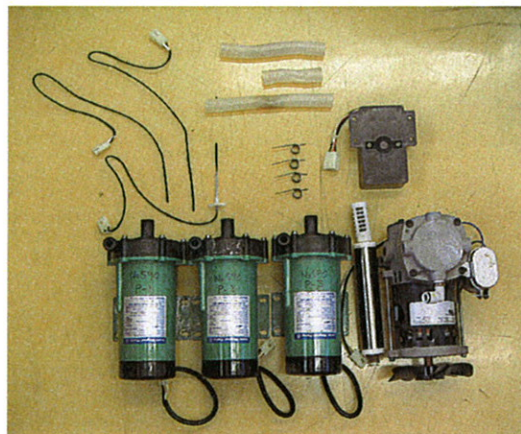

〔2〕修理・点検内容

- 部品交換：下表と写真をご参照ください。
- オゾン水濃度測定：0.42～0.57mg/L ・ 正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検 ・ 正常
酸素濃度：93.8% 酸素流量：0.8 L/min 圧力：0.075～0.144MPa（AC100V、50Hz）
- 運転動作確認 ・ 正常
- オゾンインジケータ変色 ・ 正常
- 運転カウンタ ・ 3423 回

—以上—

交換部品

承認
江 23.6.29 口
審査
江 23.6.29 口
作成
H23.6.29 中澤

部品番号	部品名称	数量	備考
	エアコンプレッサー	1	
	水ポンプ	3	P-1、P-2、P-3
	オゾンセンサー	1	
	水位レベルセンサー	3	LVL、LVH1、LVH2
	フタスプリング	4	

（株）IHIシバウラ