

安産青雲町クリニック御中

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者: 宮内

点検年月日	24 平成20年 3 月 12 日	機種名	ONW-10	製造機番	001490
設置場所				TEL	
設置時期	2007/11	使用時間	297	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
給水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度:	0.4 mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度: 89 %	流量: 0.8 L/min 圧力: 139 ~ 79 MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
装置内	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
清掃				
外装	正常	☐	清掃	☒
内部	正常	☐	清掃	☒
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

年 月 日

ご署名 和賀

印

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHIシバウラ

環境事業部

日付: 11/24/12

作業者 佐田

ONW-10機番: 001490

PSA機番: SPS- 10728

客先: 青雲町リニフ

様

定期交換部品		
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS- 0656)	☒	否
ドレン用フィルターを交換したか	☒	否
排水シリコンチューブを交換したか	☒	否
オゾン分解触媒を交換したか	☒	否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	☒	否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	☒	否
PSA性能確認		
圧力スイッチのゼロ点は合っているか (±0.005Mpa以内)	☒	否
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後)(90%以上) (89.3 %)	☒	否
酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min) (0.82 L/min)	☒	否
PSA圧力の確認 (1.39 Mpa) ~ (1.79 Mpa)		参考値
外装の取付		
オゾンセンサーは配線したか	☒	否
フロントパネルのランプは配線したか	☒	否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	☒	否
ドレンチューブは接続したか	☒	否
確認事項		
フタパッキンに剥がれはないか	☒	否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	☒	否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)	☒	否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	☒	否
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	☒	否
別紙 点検確認書に記録したか	☒	否
確認試験		
オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)	☒	否
運転は正常か、エラーはでないか	☒	否
インジケータの変色は良好か	☒	否

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)

運転回数 297回