

川島内科

御中

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者: 宮内

点検年月日	平成 26 ²⁷ 年 4月 20日	機種名	ONW-10	製造機番	000692
設置場所	内視鏡室			TEL	
設置時期		使用時間	776回	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
給水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度:	0.3 mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度: 92%	流量: 0.8 L/min 圧力: 16929/ MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
装置内	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☒	一式	
吸湿筒	交換 ☒	一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☒	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個	

1127年 4月 20日

ご署名

川島 真人

印

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHIシバウラ

環境事業部

日付: 1724-4-20

作業者 宮内 啓太

ONW-10機番: 006692

PSA機番: SPS-10878

客先: 川島内科

様

定期交換部品		
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-06/1)	(合) 否	
ドレン用フィルターを交換したか	(合) 否	
排水シリコンチューブを交換したか	(合) 否	
オゾン分解触媒を交換したか	(合) 否	
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	(合) 否	
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	(合) 否	
PSA性能確認		
圧力スイッチのゼロ点は合っているか (±0.005Mpa以内)	(合) 否	
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後)(90%以上) (92 %)	(合) 否	
酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min) (0.8 L/min)	(合) 否	
PSA圧力の確認 (91 Mpa) ~ (164 Mpa)	参考値	
外装の取付		
オゾンセンサーは配線したか	(合) 否	
フロントパネルのランプは配線したか	(合) 否	
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	(合) 否	
ドレンチューブは接続したか	(合) 否	
確認事項		
フタパッキンに剥がれはないか	(合) 否	
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	(合) 否	
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)	(合) 否	
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	(合) 否	
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	(合) 否	
別紙 点検確認書に記録したか	(合) 否	
確認試験		
オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)	(合) 否	
運転は正常か、エラーはでないか	(合) 否	
インジケータの変色は良好か	(合) 否	

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)