

保守点検・修理 報告書

管理 No.

01-201

発行日 平成24年6月4日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100174
作業年月日	平成24年6月4日		作業時間:	1 Hr
顧客名	西家内科		TEL:	
所在地			担当	様
販売店	(株)竹山		担当	河元 様
納入年月日	平成23年5月27日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目		定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

バルブ数 362

履歴 0.72 ppm

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 12	更新（リセット）実施・未実施	殺菌: 4	殺菌+7L: 14
	リークチェック: 16	自己洗浄: 16	7L単独: 1	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解吸盤		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
酸素ライン		☒	1			☐	
オゾンセンサ		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

24年6月4日

ご署名 西家 極他 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北七条東4丁目
TEL: 011-741-7752

責任技術者

作業者

