

若浜医院

御中

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者：宮内

点検年月日	平成24年3月12日	機種名	ONW-10B	製造機番	001764
設置場所	内視鏡室			TEL	
設置時期	2009/9	使用時間		御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度：	0.4 mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素配管	正常	☒		
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品	数量	コメント
オゾン分解触媒	一個	

年 月 日

署名

中村 有紀子

中村

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 ONW-10B 作業チェックリスト

株式会社 IHIシバウラ

環境事業部

日付: 24年 3月 12日 作業者 宮内 啓太

ONW-10B 機番: 001764

客先: 若狭病院

様

定期交換部品	
排水シリコンチューブを交換したか	合 ☒ 否 ☐
オゾン分解触媒を交換したか	合 ☒ 否 ☐
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	合 ☒ 否 ☐
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	合 ☒ 否 ☐
酸素ガス配管確認	
ボンベレギュレーターの圧力計の指針は正常に動くか	合 ☒ 否 ☐
ボンベレギュレータの二次側圧力は正常か(0.21~0.29Mpa)	合 ☒ 否 ☐
酸素ボンベ~ONWまでの配管に漏れは無い	合 ☒ 否 ☐
酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min) (0.82 L/min)	合 ☒ 否 ☐
外装の取付	
オゾンセンサーは配線したか	合 ☒ 否 ☐
フロントパネルのランプは配線したか	合 ☒ 否 ☐
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	合 ☒ 否 ☐
確認事項	
フタパッキンに剥がれはないか	合 ☒ 否 ☐
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	合 ☒ 否 ☐
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)	合 ☒ 否 ☐
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	合 ☒ 否 ☐
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	合 ☒ 否 ☐
確認試験	
別紙 点検確認書に記録したか	合 ☒ 否 ☐
オゾン水濃度の確認(0.3mg/L以上)	合 ☒ 否 ☐
運転は正常か、エラーはでないか	合 ☒ 否 ☐
インジケータの変色は良好か	合 ☒ 否 ☐
運転プログラムのバージョン確認 (平成21年6月現在「11」が最新)	合 ☒ 否 ☐

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)