

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 24 年 9 月 27 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100038
作業年月日	平成 24 年 9 月 27 日		作業時間:	1 Hr
顧客名	こがし病院		TEL:	
所在地			担当	様
販売店	(株) ロックメディカル		担当	様
納入年月日	平成 22 年 9 月 22 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 3/10
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 445	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 93	殺菌+7L: 052
	リークチェック: 284	自己洗浄: 2	7L単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	内視鏡接続		☒	2
排水栓		☒	1	2号7L		☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
脱気フィルター		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

24 年 9 月 27 日

ご署名 鈴木 春美 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北七条東4丁目
TEL: 011-741-7752

責任技術者	作業者
12.9.27 西	12.9.27 内