

札幌ライオン病院 御中

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者: 宮内 啓太

点検年月日	平成30年 12月 26日	機種名	ONW-10	製造機番	001650
設置場所	内視鏡室	TEL			
設置時期		使用時間	394 (180)	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常 ☒	交換	☐	
フィルタリセット釦	正常 ☒	交換	☐	
運転/停止釦	正常 ☒	交換	☐	
アルコールモード釦	正常 ☒	交換	☐	
ランプ類				
操作パネル	正常 ☒	交換	☐	
蛍光灯	正常 ☒	交換	☐	
洗浄動作				
フタロック	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
給水	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
オゾン分解ファン	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
排水	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
異常音、振動	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常 ☒	濃度: 0.6	mg/L	
オゾンインジケータ	正常 ☒			
酸素発生	正常 ☒	濃度: 85 %	流量: 0.72 L/min	圧力: 104 ~ 182 MPa
水漏れ確認				
装置外	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
装置内	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
清掃				
外装	正常 ☒	清掃	☐	
内部	正常 ☒	清掃	☐	
洗浄コネクタ	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
洗浄チューブ	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

24年12月26日

署名 杉田 啓子

印