

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

04-10661

No. 120709

配布先	納入先	新鋭工業（株）札幌支店 殿			機種	OED-1000
客先	顧客名	長沼内科消化器科 様			機番	100083
環営	所在地	北海道夕張郡長沼町西町1-8-16			納入日	平成22年9月27日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間		受付日	平成24年5月21日
	返送先	納入先と同じ			出荷日	平成24年7月6日
計	3					

修理依頼・不具合内容

液晶不良

※タッチパネル S/N : 087374H007529 DATE 11/09

不具合原因（故障箇所）と処置予定

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

機械受領時は異常再現しませんでした。電源を入れたまま「待機」状態で1晩～2日放置すると、タッチパネルを触れても起動しない現象を確認しました。

約1ヵ月間、不具合の確認と機械側の電源系統を計測して異常が無いことを確認し、7/3にタッチパネルをメーカーに持ち込んで調査を依頼しました。
調査結果が届き次第 報告させていただきます。

〔2〕修理・点検内容

- 部品交換（下表をご参照ください）
- オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.67ppm・・・正常
- 運転確認・・・・・・・・・・正常

〔3〕受け入れ時の装置情報

殺菌：1724回 殺菌＋アルコール：2891回 リークチェック：51回
自己洗浄：491回 アルコール単独：14回 エアページ単独：0回

—以上—

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
762302530	タッチパネル	1個	
	濃度計用フィルタ	1枚	

承認



審査



作成

H24. 7. 9
中澤

(株) I H I シバウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528