

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成25年 3月6日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100291
作業年月日	平成25年 3月 6日		作業時間:	1 Hr
顧客名	札幌心臓リハビリ病院		TEL:	011-871-1121
所在地	札幌市白石区南水三ツ5条3丁目5-10		担当	石坂 様
販売店	ロックXティカル(株)		担当	若崎 様
納入年月日	平成24年 1月23日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 / 回目	
出張・引取	修理 ☐	定期点検シート記入 ☒		
			修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目		結果	備考
フタロック	正常	☒	
酸素ライン	正常	☒	
アルコールライン	正常	☒	
オゾンセンサ	正常	☒	
給水ライン	正常	☒	
濃度計流量	正常	☒	
水位センサー	正常	☒	
水漏れ確認	正常	☒	
清掃	正常	☒	清掃 ☐
トレイ	正常	☒	
殺菌槽コネクタ	正常	☒	
殺菌槽 LED	正常	☒	
エアライン	正常	☒	
オゾン水濃度計動作	正常	☒	バク数 770
排水栓、排水ライン	正常	☒	
細管送水ライン	正常	☒	
排気ライン	正常	☒	
オゾン濃度	正常	☒	履歴 6.74 ppm
異常音、振動	正常	☒	
電源コード	正常	☒	
殺菌チューブ類	正常	☒	
		正常 ☐	

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数:	13117 更新(計1)実施・未実施	殺菌:	336	殺菌+7L:	941
	リークチェック:	2	自己洗浄:	247	7L単独:	21
					エア単独:	8

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	
脱気フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサ		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

25年 3月 6日

ご署名 石坂 京子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北七条東4丁目
TEL: 011-741-7752

責任技術者	作業者
	