

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

04-11605

No. 130424

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 札幌支店 殿			機種	OED-1000
客先	顧客名	恵庭第一病院 様			機番	100035
環営	所在地	北海道恵庭市福住町1丁目6-6			納入日	平成22年6月29日
環品	点検者	中澤 一裕	作業時間		受付日	平成25年4月12日
	返送先	納入先と同じ			出荷日	平成25年4月17日
計	3					

修理依頼・不具合内容

水漏れ および 基板損傷

不具合原因（故障箇所）と処置予定

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

オゾン水製造側のシリコンチューブが劣化して亀裂が発生し、そこから漏れた水がオゾン水濃度計基板にかかり、基板が損傷しておりました。
補強したチューブに交換し、損傷した部品を交換して復旧しました。

写真1：オゾン水濃度計基板


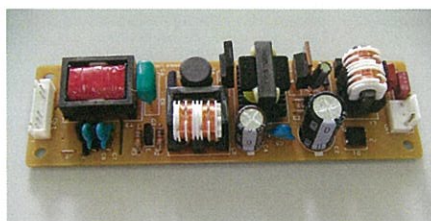


写真2：オゾン水製造側チューブ

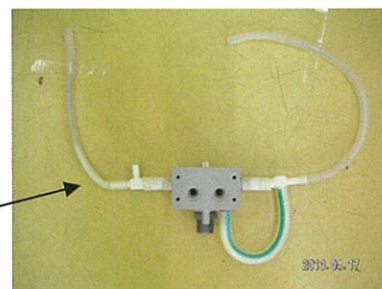

亀裂部

〔2〕修理・点検内容

- 1：部品交換（下表および写真をご参照ください）
- 2：運転プログラム書き換え Ver0105/T01.A ⇒ Ver0107/T01.A
日付によってはタッチパネル「定期点検のお知らせ画面」が出ない不具合を修正しました。
- 3：タッチパネル時刻調整：13:56⇒14:36（40分）
- 4：性能確認・・・正常 オゾン水濃度：0.7ppm 濃度計パルス信号：458
- 5：運転確認・・・正常
- 6：出荷時の装置情報
前回定期交換日：2012/05/11 運転プログラム：Ver0107/T01.A
交換後運転回数：1752 殺菌：1914、殺菌＋アルコール：3814、リ Chec k：5
自己洗浄：825、アルコール単独：116、エア単独：7

一以上一

承認



審査



作成

H25. 4. 24
中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	オゾン水濃度計基板	1枚	
	オゾン水製造側チューブ	1式	

（株）IHIシバウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528