

保守点検・修理 報告書

管理 No.

11605

発行日

平成25年4月25日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	1000035	
作業年月日	平成25年4月25日		作業時間	1 Hr	
顧客名	恵庭カネ病院		TEL	0123-34-1155	
所在地	恵庭市福住町1丁目6-6		担当	B11 様	
販売店	ロックスデカル(株)		担当	山田 様	
納入年月日	平成22年6月29日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	なし
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	1年 / 回目		
出張・引取	修理 ☐	定期点検シール記入 ☒			
			修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 458
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.7 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 1752	更新(リセット)実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 1914	殺菌+7L: 0814
	リークチェック: 5	自己洗浄: 825	7L単独: 116	エア単独: 7

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒				☐	
排水栓		☒				☐	
オゾン水濃度計		☒				☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒				☐	
オゾンセンサー		☒				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

B11

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北6条東5-1-4
TEL: 011-741-7752

責任技術者

作業者

