

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日 平成25年10月1日

|       |                      |      |   |       |              |     |
|-------|----------------------|------|---|-------|--------------|-----|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000  |      |   | 製造番号: | 100038       | Ver |
| 作業年月日 | 平成25年10月1日           |      |   | 作業時間: | 1 Hr         |     |
| 顧客名   | こがし病院<br>網走市字潮見153-1 |      |   | TEL:  | 0152-61-0101 |     |
| 所在地   |                      |      |   | 担当    | 鈴木 岩崎 様      |     |
| 販売店   | コムクスデイルカル(株)         |      |   | 担当    |              |     |
| 納入年月日 | 平成22年9月22日           | 保証期間 | 内 | 外     | 付属品          |     |
| 作業区分  | 保守点検                 | 総合点検 | 年 | 回目    | 定期点検シール記入    |     |
| 出張・引取 | 修理                   |      |   |       | 修理表示貼付       |     |

不具合状況、依頼内容、異常履歴  
オゾン水生成異常

不具合原因、作業内容  
オゾンタイザーに水が混入した為、オゾンタイザー交換

| 点検項目     |    | 殺菌槽 LED   | 正常 |
|----------|----|-----------|----|
| フタロック    | 正常 | 正常        | OK |
| 酸素ライオン   | 正常 | エアライン     | 正常 |
| アルコールライン | 正常 | オゾン水濃度計動作 | 正常 |
| オゾンセンサ   | 正常 | 排水栓、排水ライン | 正常 |
| 給水ライン    | 正常 | 細管送水ライン   | 正常 |
| 濃度計流量    | 正常 | 排気ライン     | 正常 |
| 水位センサー   | 正常 | オゾン濃度     | 正常 |
| 水漏れ確認    | 正常 | 異常音、振動    | 正常 |
| 清掃       | 正常 | 電源コード     | 正常 |
| トレー      | 正常 | 殺菌チューブ類   | 正常 |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 |           | 正常 |

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

|      |          |                 |       |        |
|------|----------|-----------------|-------|--------|
| 装置情報 | 交換後運転回数: | 更新 (リフト) 実施・未実施 | 殺菌:   | 殺菌+7L: |
|      | リークチェック: | 自己洗浄:           | 7L単独: | エア単独:  |

| 交換部品名称      | 部品コード | 交換 | 数量 | 交換部品名称  | 部品コード | 交換 | 数量 |
|-------------|-------|----|----|---------|-------|----|----|
| オゾン分解触媒     |       | OK | 1  | オゾンタイザー |       | OK | 1  |
| 排水栓         |       | OK | 1  |         |       | OK |    |
| オゾン水濃度計     |       | OK | 1  |         |       | OK |    |
| オゾン水濃度計用7L用 |       | OK | 1  |         |       | OK |    |
| オゾンセンサー     |       | OK | 1  |         |       | OK |    |

お客様ご確認署名欄  
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。  
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店  
北海道札幌市東区北6条東5-1-4  
TEL: 011-741-7752

責任技術者

作業者

