

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成25年8月29日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000			製造番号:	M0034	
作業年月日	平成25年8月29日			作業時間:	1	
顧客名	内科胃腸科(外)ニッポ長尾医院			TEL:	011-861-4696	
所在地	札幌市白石区本通11丁目南1-9			担当	松島	
販売店	ロックスデカル(株)			担当	松島	
納入年月日	平成22年6月18日	保証期間	内 外	内	外	付属品
作業区分	保守点検	総合点検	年	回目	定期点検シール記入	
出張・引取	修理				修理表示貼付	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

排水異常

不具合原因、作業内容

排水ホース付替え

点検項目		結果	殺菌槽 LED	正常	殺菌+7L:	殺菌+7L:
フタロック	正常	OK	エアライン	正常	OK	497
酸素ライン	正常	OK	オゾン水濃度計動作	正常	OK	497
アルコールライン	正常	OK	排水栓、排水ライン	正常	OK	
オゾンセンサ	正常	OK	細管送水ライン	正常	OK	
給水ライン	正常	OK	排気ライン	正常	OK	
濃度計流量	正常	OK	オゾン濃度	正常	OK	0.69 ppm
水位センサー	正常	OK	異常音、振動	正常	OK	
水漏れ確認	正常	OK	電源コード	正常	OK	
清掃	正常	OK	殺菌チューブ類	正常	OK	
トレー	正常	OK				
殺菌槽コネクタ	正常	OK				
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項						

装置情報	交換後運転回数:	95	更新 (リフト) 実施:	260	殺菌+7L:	48
	リークチェック:	5	自己洗浄:	2	7L単独:	0
					エア単独:	0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒	95	OK	1			OK	
排水栓		OK	1			OK	
オゾン水濃度計		OK	1			OK	
オゾン水濃度計用7L用		OK	1			OK	
オゾンセンサー		OK	1			OK	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

平成25年8月30日
ご署名 長尾真幸



修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北6条東5-1-4
TEL: 011-741-7752

責任技術者 作業者