

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成26年3月11日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100035	
作業年月日	平成26年3月11日		作業時間:	1 Hr	
顧客名	恵庭第一病院		TEL:	0123-34-1155	
所在地	恵庭市福住町1丁目6-6		担当	山田様	
販売店	ロックスカル(株)		担当	山田様	
納入年月日	平成22年6月29日	保証期間	内口	外口	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年	回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐				修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 626
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数:	1626	更新(リセット)実施・未実施	殺菌:	2534	殺菌+アル:	4825
	リークチェック:	6	自己洗浄:	1085	アルコール単独:	152	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	洗浄コネクタ		☒	2
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北6条東5-1-4
TEL: 011-741-7752

責任技術者

作業者

