

管理 No.

発行日 平成26年03月26日

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000			製造番号:	100745
作業年月日	平成26年03月26日			作業時間:	1 hr
顧客名	桜花内科歯科医院			TEL:	
所在地				担当	熊谷 様
販売店	株式会社 小澤支店			担当	中島 様
納入年月日	平成25年4月24日	保証期間	内	外	付属品
作業区分	保守点検	総合点検	年	回目	定期点検シール記入
出張・引取	修理				修理表示貼付

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
1/25 E207 4X3 (殺菌タンク交換済み)	
2/31 E101 1	
3/28 E207 4	
不具合原因、作業内容	

点検項目			
フタロツク	正常	殺菌槽 LED	正常
酸素ライン	正常	エアライン	正常
アルコールライン	正常	オゾン水濃度計動作	正常
オゾンセンサ	正常	排水栓、排水ライン	正常
給水ライン	正常	細管送水ライン	正常
濃度計流量	正常	排気ライン	正常
水位センサー	正常	オゾン濃度	正常
水漏れ確認	正常	異常音、振動	正常
清掃	正常	電源コード	正常
トレー	正常	殺菌チューブ類	正常
殺菌槽コネクタ	正常		正常

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 336	更新 (リフト) 実施・未実施	殺菌:	73	殺菌+7L:	263
	リークチェック:	自己洗浄:	7L単独:	0	エア単独:	0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		✓	1			□	
排水栓		✓	1			□	
オゾン水濃度計		✓	1			□	
オゾン水濃度計用7L用		✓	1			□	
オゾンセンサー		✓	1			□	

お客様ご確認事項欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年	月	日
〒047-0033 小樽市大門丁13番21号 医療法人社団 桜花内科歯科医院 院長 阪谷 晴 隆		
ご署名		

修理業者	新鋭工業 株式会社 札幌支店	責任技術者	松本
北海道札幌市東区北6条東5-1-4			
TEL: 011-741-7752			