

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成26年4月18日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100037
作業年月日	平成26年4月18日		作業時間:	1 Hr
顧客名	苫小牧日翔病院		TEL:	0144-72-7000
所在地	苫小牧市矢代町2丁目9-13		担当	様
販売店	ロックスメディカル(株)		担当	富田 様
納入年月日	平成22年8月4日	保証期間	内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/>	付属品
作業区分	保守点検 <input type="checkbox"/>	総合点検 <input type="checkbox"/>	年 回目	定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>
出張・引取	修理 <input checked="" type="checkbox"/>			修理表示貼付 <input type="checkbox"/>

不具合状況、依頼内容、異常履歴
 タッチパネルの電源が入らない。

不具合原因、作業内容
 タッチパネルの交換。

点検項目

フタロック	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌槽 LED	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
酸素ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	エアライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
アルコールライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン水濃度計動作	正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 220
オゾンセンサ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排水栓、排水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
給水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	細管送水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
濃度計流量	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排気ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
水位センサー	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン濃度	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.75 ppm
水漏れ確認	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	異常音、振動	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
清掃	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/>	電源コード	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
トレー	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌チューブ類	正常 <input type="checkbox"/>
殺菌槽コネクタ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>		正常 <input type="checkbox"/>

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
 タッチパネルは原因確認中
 前回XNT 2014/9/17

装置情報	交換後運転回数:	更新(リセット)実施・未実施	殺菌:	殺菌+7L:
	リークチェック:	自己洗浄:	アルコール単独:	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		<input type="checkbox"/>		タッチパネル		<input checked="" type="checkbox"/>	1
排水栓		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	
オゾン水濃度計		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	
オゾン水濃度計用フィル		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	
オゾンセンサー		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	

お客様ご確認署名欄
 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

26年4月21日
 ご署名 佐藤 祐子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
 北海道札幌市東区北6条東5-1-4
 TEL: 011-741-7752

