

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 26 年 1 月 26 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100183	
作業年月日	平成 27 年 1 月 26 日		作業時間:	1 Hr	
顧客名	弟子屈クリーニング		TEL:	0154-82-2220	
所在地	川上郡弟子屈町湯の島3丁目1-10		担当	様	
販売店	(株)XILFO		担当	清水 様	
納入年月日	平成 23 年 1 月 26 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐			修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

アルコールの減りが早い

不具合原因、作業内容

点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 555
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.75 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

アルコール使用量は問題ありませんでした。
しばらく様子を見て下さい。

装置 情報	交換後運転回数:	55	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌:	306	殺菌+アル:	18
	リークチェック:	365	自己洗浄:	0	アルコール単独:	0	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	殺菌カートリッジ		☒	2
排水栓		☒	1	エアクリーン		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	洗浄エアクリーン		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	0427		☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 小田 和香子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北6条東5-1-4
TEL: 011-741-7752

責任技術者	作業者
	宮内