

株式会社IHIアグリテック
環境プロジェクト部 サービスグループ
〒704-8122
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL 086-944-6528
FAX 086-942-9030

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer 設置報告書

お客様	名称	乙部せきデジタルクリニック 様	製造番号	100-96	ご確認	関 さおし
	住所	〒116-0001 北海道札幌市東区乙部町緑町248-1	納入日	2018年1月17日		
	Tel	0139-62-4618	納入検査実施者	IAT 桐野, 中村		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目	
ドア	OK	開閉動作確認	外装・設置	OK	本体の水平確認 ドアLOCK位置確認	
	OK	ドアパッキンキズ・汚れ点検		OK	アジャスタフットの緩み・設置状態	
	OK	ドアロックユニット作動確認		OK	キズ・汚れ	
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	ドア開閉時装置設置位置がずれないこと	
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態	スペース	✓	装置設置スペースの確保 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと	
洗剤ポンプ	OK	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	制御	✓	運転プログラムの確認(規定消毒温度・時間)終了後タッチパネル確認	
	OK	洗剤ホースのキズ・折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ		✓	タッチパネル表示確認・履歴の確認	
	OK	洗剤投入量の確認		✓	ラック仕様切換(ハントピ→スラック・標準ラック)	
	OK	ローラーポンプの動作確認		有・無	温水使用切換	
給排水	OK	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	評価機能	✓	インジケーターによる残渣判定(TOSI)	
	OK	排水ホースの取回し(背圧・ラック引出時影響・臭気トラップ)		その他	✓	周波数と設置ICWの一致
	OK	お湯・水配管(供給状態に問題は無い、水ノ湯逆配管NG)			✓	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付
	OK	給水・給湯流量(水・お湯の分岐・開業時流量 影響)			✓	運転・お手入れ方法の説明
	OK	給湯温度(45～50℃) (49℃)			✓	装置内運転時異音・振動
電装系	OK	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ	運転検査結果	☒ 良好	トシ	
	OK	ディスプレイの色あせ・表示確認		☐ 不良		
	OK	電源スイッチの作動状態				
	✓	SDカードの挿入・取外性				
	OK	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと(漏電・熱注意)				
OK	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ					

特記事項

- ・給湯限度時間: 600秒へ延長はなし
- ・温度センサー間差: 5℃ 100秒へ変更はなし