

保守点検・修理 報告書

管理 No. 15-006

発行日 平成27年 4月 7日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号: 300176
作業年月日	平成27年 4月 7日	作業時間: 1 Hr
顧客名	森内科胃腸科医院	TEL: 0185-32-3955
所在地	余市郡仁木町北町1丁目6-2	担当 高杉 様
販売店	(株) 梅川医科器械店	担当 平川 様
納入年月日	平成26年 3月 25日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

本体正面左側、キスター付近から水もれした。

不具合原因、作業内容

水もれは確認出来ませんでした。
しばらく様子を見て下さい。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 4/5
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.74 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

点検の結果異常ありませんでした。

装置情報	交換後運転回数: 858 更新(リセット)実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 332	殺菌+アル: 526
	リークチェック: ☒	自己洗浄: ☒	アルコール単独: 0 エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィル		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27年 4月 7日

ご署名

高杉

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北6条東5-1-4
TEL: 011-741-7752

責任技術者

作業者

