

株式会社IHIアグリテック
環境プロジェクト部 サービスグループ
〒704-8122
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL 086-944-6528
FAX 086-942-9030

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer 設置報告書

お客様	名称	竹田病院 歯科 様	製造番号	100037	函 館 市 元 町 29 番 21 号 医療法人 尚仁会 竹田 病院 歯 科 医 竹 田 仁 一
	住所	北海道 函館市元町29-21	納入日	2018.9.18	
			納入検査実施者	IAT 関口, 中村	

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	✓	開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認 ドアLOCK位置確認
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	キズ・汚れ
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	ドア開閉時装置設置位置がずれないこと
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態	スペース	✓	装置設置スペースの確保 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと
洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	制御	✓	運転プログラムの確認(規定消毒温度・時間)終了後タッチパネル確認
	✓	洗剤ホースのキズ・折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ		✓	タッチパネル表示確認・履歴の確認
	✓	洗剤投入量の確認		✓	ラック仕様切換(ハントベースラック・標準ラック)
	✓	ローラーポンプの動作確認		有・無	温水使用切換
給排水	✓	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	評価機能	✓	インジケーターによる残渣判定(TOSI)
	✓	排水ホースの取回し(背圧・ラック引出時影響・臭気トラップ)		✓	周波数と設置ICWの一致
	✓	お湯・水配管(供給状態に問題は無い、水ノ湯逆配管NG)	その他	✓	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付
	✓	給水・給湯流量(水・お湯の分岐・開業時流量 影響)		✓	運転・お手入れ方法の説明
	✓	給湯温度(45～50℃)		✓	装置内運転時異音・振動
電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ	運転検査結果	☒ 良好	トシ
	✓	ディスプレイの色あせ・表示確認		☐ 不良	
	✓	電源スイッチの作動状態			
	✓	SDカードの挿入・取外性			
	✓	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと (漏電・熱注意)			
	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ			

特記事項

安全説明確認カード

下記の販売説明員から装置の安全な取り扱いと操作及び保証書の内容について、説明を聞きました。

●説 明 日	2018 年 9 月 18 日
●お客様ご住所	〒□□□-□□□□ 29 番 21 号 医療法人尚仁会 竹田病院
●お電話番号	☎ 歯科医 竹田 仁 二
フリガナ ●お客様のお名前 (署名)	

●販 売 店 住 所	〒□□□-□□□□
●販 売 店 名	☎ ()

●納入説明者氏名	(株) IHI アグリテック 中村
----------	-------------------

●ご購入商品と
製造番号

形式名	製造番号
Ic Washer	100337

備 考

①メーカー控え
(説明者→(株)IHIアグリテック)