

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年 8月12日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100285
作業年月日	平成27年 8月12日		作業時間: 1 hr
顧客名	山田クリニック		TEL: 0146-43-0008
所在地	日高町新町4丁目30-27		担当 様
販売店	株式会社		担当 山田 様
納入年月日	平成23年 5月 5日	保証期間 内 □ 外 □	付属品
作業区分	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 修理 <input type="checkbox"/>	総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回 目	定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>
出張・引取	修理表示貼付 <input type="checkbox"/>		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌槽 LED	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
エアライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	エアライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
アルコールライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン水濃度計動作	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
オゾンセンサ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排水栓、排水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
給水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	細管送水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
濃度計流量	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排気ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
水位センサ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン濃度	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
水漏れ確認	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	異常音、振動	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
清掃	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	清掃 <input type="checkbox"/>	電源コード	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
トリー	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌チューブ類	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
殺菌槽コネクタ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	正常 <input type="checkbox"/>	正常 <input type="checkbox"/>
作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項				

装置情報	交換後運転回数: 127	更新(リフト)実施・未実施	殺菌: 42	殺菌+7L: 464	自己洗浄: 427	7L-1単独: 2	エア単独: 0
------	--------------	---------------	--------	------------	-----------	-----------	---------

交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		<input checked="" type="checkbox"/>	1
排水栓		<input checked="" type="checkbox"/>	1
オゾン水濃度計		<input checked="" type="checkbox"/>	1
オゾン水濃度計用7L缶		<input checked="" type="checkbox"/>	1
オゾンセンサ		<input checked="" type="checkbox"/>	1
交換部品名称	部品コード	交換	数量
殺菌274A(本体)		<input checked="" type="checkbox"/>	2

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

27年 8月 12日

ご署名

山田 様

印

修理業者

新銳工業 株式会社 札幌支店

北海道札幌市東区北6条東5-1-4

TEL: 011-741-7752

責任技術者	山田 様
作業者	山田 様