

《不具合対応報告書》

担当者: 中村

【発生日】 2018年12月27日
 【対応日】 2018年12月27日
 【連絡元】 ☒モリタ (担当者: 北海道・森谷) ☐ユーザー ☐その他 ()
 【ユーザー名&県名】 北海道・アッパ歯科

IC Washer【機番: 100067】

IC Clave【機番: 】

【症状】

- エラーNo.16 槽内温度低下

【対応方法】 ☐引取り修理 (代替機no.)

☒現地対応

《対応内容》 ☐部品交換 () ☒その他 (設定変更)

【給水方法】 ☐水

☐水&お湯

【ラック種類】 ☐標準ラック

☐ハンドピース用ラック

《メクラ栓の使用》 ☐有 ☐無

《SUSフィルターの洗浄》 ☐有 ☐無

【備考】

・ 12/27 に1度発生。
 ・ 処理量が少いので、設定 (温度センサー間差) を変更し、対応。
 (・ 加温限度時間 300秒 → 500秒
 ・ 温度センサー間差 3℃ → 5℃
 45秒 → 120秒)

【症状】

【対応方法】 ☐引取り修理 (代替機no.)

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換 () ☐その他 ()

【給水方法】 ☐アイオニー使用

☐精製水購入

☐その他 ()

【滅菌バッグ】 ☐ディスボ

☐リユース

【網の種類】 ☐トレー棚

☐網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ☐有 ☐無

【設置場所】

【備考】