

保守点検・修理 報告書

管理 No.

05-930

発行日 平成 27 年 9 月 30 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100559
作業年月日	平成 27 年 9 月 30 日		作業時間:	1.5 Hr
顧客名	町立別海病院		TEL:	0153-75-2311
所在地	野付郡別海町別海西本町103-9		担当	加瀬 様
販売店	(株)XILP		担当	沢井 様
納入年月日	平成 24 年 9 月 19 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合は特になし
殺菌槽異常 E:101

不具合原因、作業内容

保守点検 内部シリコンホース交換

GIF-260 上部

GIF-XP260N 専用 白丸

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 522
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に異常ありません。

装置 情報	交換後運転回数:	983	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌:	436	殺菌+7L:	1328
	リークチェック:	0	自己洗浄:	0	アルコール単独:	0	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	内部ホース		☐	1
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 加瀬 めぐみ

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北 6 条東 5-1-4
TEL: 011-741-7752

責任技術者

作業者

