

保守点検・修理 報告書

管理 No. 15-001
発行日 平成27年11月25日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100-287
作業年月日	平成27年11月25日		作業時間:	1 Hr
顧客名	平取町国民健康保険病院		TEL:	01451-2-2201
所在地	沙流郡平取町本町67-1		担当	様
販売店	D-7Xデikal (株)		担当	山田 様
納入年月日	平成23年9月6日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
9/16.オゾン水生成異常(E-207)			
不具合原因、作業内容			
特に異常はありませんでした。			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 465
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.8 / ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
特に異常はありませんでした。			

装置 情報	交換後運転回数:	53	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌:	27	殺菌+7L:	2/7
	リークチェック:	2	自己洗浄:	0	アルコール単独:	0	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	接続コネクタ		☒	2
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	福士 美鶴 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北6条東5-1-4
TEL: 011-741-7752

責任技術者	作業者