

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成28年7月27日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100291
作業年月日	平成28年7月27日		作業時間:	1 Hr
顧客名	札幌セントリ-病院		TEL:	011-871-1121
所在地	札幌市白石区栄水元町5条3丁目5-10		担当	様
販売店	ロックスデカル(株)		担当	岩崎 様
納入年月日	平成24年1月23日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検
殺菌槽異常

不具合原因、作業内容

保守点検 清掃

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 437
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレ-	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

特に問題ありません。
後日 マニホールド 交換

装置 情報	交換後運転回数：1540	更新(リセット)実施・未実施	殺菌：2450	殺菌+7L：2290
	リークチェック：2	自己洗浄：884	アルコール単独：185	エア単独：8

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	洗浄(5-7)	オス-xs	☒	1
排水栓		☒	1	2722-		☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

28 年 7 月 27 日

ご署名



修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北6条東5-1-4
TEL: 011-741-7752

責任技術者

作業者

