

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28 年 4 月 21 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100459	
作業年月日	平成 28 年 4 月 21 日		作業時間:	3	Hr
顧客名	横山内科消化器科		TEL:	0144-74-0011	
所在地	苫小牧市川治町4丁目1番2号		担当	様	
販売店	1-ス×ティコ(株)		担当	小野 様	
納入年月日	平成 24 年 4 月 26 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☒	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

3/7 殺菌時給水異常 (E:202)
水位低下異常 (E:300)
殺菌槽異常 (E:101)

不具合原因、作業内容

水位センサー不良
保守点検

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 601
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

不具合は確認出来ませんでした。水位センサーとコントロール基板を交換しております。

装置 情報	交換後運転回数:	1255	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌:	2747	殺菌+7L:	2141
	リークチェック:	4	自己洗浄:	935	7L単独:	1	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	アニホールド		☒	1
排水栓		☒	1	ホースコ		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	コントロール基板		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	水位センサー	LWH 2	☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 森井

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北6条東5-1-4
TEL: 011-741-7752

責任技術者

作業者

