

保守点検・修理 報告書

管理 No. 1713
発行日：平成28年7月27日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input checked="" type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input type="checkbox"/>	製造番号：100293
作業年月日	平成28年7月27日	作業時間：1 Hr
顧客名	五ノぼろ二十四軒病院 様	TEL：641-2281
所在地	札幌市西区二十四軒2条4丁目7-20	ご担当 木村 様
販売店	(株)414	ご担当 毛利 様
納入年月日	平成24年4月9日	保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/>
作業区分	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目	定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>
出張・引取	修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>	修理表示貼付 <input type="checkbox"/>

不具合状況、依頼内容、異常履歴
殺菌槽異常 1/2、保守点検

不具合原因、作業内容
保守点検
定期交換部品の交換

点検項目		結果	備考
フタロック	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
酸素ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
アルコールライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
オゾンセンサ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
給水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
濃度計流量	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
水位センサー	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
水漏れ確認	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
清掃	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	清掃 <input type="checkbox"/>
トレー	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
殺菌槽コネクタ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
殺菌槽 LED	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
エアライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
オゾン水濃度計動作	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	バルブ数 506
排水栓、排水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
細管送水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
排気ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
オゾン濃度	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	履歴 0.70 ppm
異常音、振動	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
電源コード	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
殺菌チューブ類	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
マニホールド周辺チューブ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
特に問題ありませんでした。

装置情報	交換後運転回数：794	更新（リセット）実施 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/>	殺菌/消毒：841	殺菌/消毒+アル：292
	リークチェック：6	自己洗浄：17/10	アルコール単独：21	エア単独：3

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		<input checked="" type="checkbox"/>	1	吸盤		<input checked="" type="checkbox"/>	1
排水栓		<input checked="" type="checkbox"/>	1	接続コネクタ：水槽側		<input checked="" type="checkbox"/>	1
ポン水濃度計		<input checked="" type="checkbox"/>	1	接続コネクタ：チューブ側		<input checked="" type="checkbox"/>	1
ポン水濃度計用フィルタ		<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input type="checkbox"/>	
オゾンセンサー		<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input type="checkbox"/>	

お客様ご確認署名欄
 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
 ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

1728年7月27日
ご署名 木村 剛己 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
 北海道札幌市東区北七条東4-28-3
 TEL：011-741-7752

責任技術者	作業者