

保守点検・修理 報告書

管理 No.

1019

発行日：平成28年8月19日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号	200620
作業年月日	平成28年8月19日		作業時間	1 Hr
顧客名	平田博巳内科クリニック 様		TEL	0138-48-2200
所在地	北斗市七重浜4丁目27-40		ご担当	様
販売店	(有)ユーミック		ご担当	福居 様
納入年月日	平成27年8月26日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目		定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐		修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検
起動時給水異常 (E:201)

不具合原因、作業内容

定期交換部品の交換

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 850
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐			☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題ありませんでした。

Ver. 0207 / T02c

装置情報	交換後運転回数：401	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒：1	殺菌/消毒+7L：430
	リークチェック：0	自己洗浄：3	7L単独：0	エア単独：0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H28年8月19日

福居 様

ご署名

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北七条東4-28-3
TEL：011-741-7752

責任技術者

作業者

