

保守点検・修理 報告書

管理 No.

831

発行日：平成28年10月27日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号	300841	
作業年月日	平成28年10月27日		作業時間	1 Hr	
顧客名	長沼内科消化器科 様		TEL	0123-82-5333	
所在地	夕張郡長沼町西町1丁目8-16		ご担当	様	
販売店	株式会社 竹山 若見沢支店		ご担当	若山 様	
納入年月日	平成28年3月29日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目		定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐		修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検
消毒時給水異常 E:202

不具合原因、作業内容

保守点検, 消耗部品の交換

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☐
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルス数 639
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☐
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐			☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題はありませんでした。
Ver. 0207 / T03c

装置 情報	交換後運転回数： 1649 更新（リセット） ☒ 実施・未実施		殺菌/消毒： 1649	殺菌/消毒＋アル： 0
	リークチェック： 31	自己洗浄： 172	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ワゴン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☐	
ワゴン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☐	
ワゴン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

28年10月27日

ご署名

宮本 真実

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北七条東4-28-3
TEL: 011-741-7752

責任技術者

作業者



Ver.3.1