

保守点検・修理 報告書

管理 No. 1153

発行日：平成29年1月24日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号	100280
作業年月日	平成29年1月24日		作業時間	1 Hr
顧客名	石田病院様		TEL	0153-72-9112
所在地	標津郡中標津町4丁目5-6		ご担当	様
販売店	(株)XLP		ご担当	松本 様
納入年月日	平成23年12月15日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
保守点検 10/14 殺菌時給水異常(E-202)	
不具合原因、作業内容	
定期点検、消耗部品の交換	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 460
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒ 洗い割れ	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
☐	☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
洗浄トレイ 洗い割れ有	

装置情報	交換後運転回数：163	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒：32	殺菌/消毒+アル：812
	リークチェック：723	自己洗浄：219	アルコール単独：0	エア単独：0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	1729 年 1 月 24 日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	忠鉢 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
 北海道札幌市東区北七条東4-28-3
 TEL：011-741-7752

責任技術者	作業者
宮 7/1/24 内	宮 7/1/24 内